

LAB & INDUSTRY EQUIPMENT

BUCH  HOLM



Buch & Holm A/S

Marielundvej 39 • 2730 Herlev • Tlf. +45 44 54 00 00 • e-mail [b-h@buch-holm.dk](mailto:b-h@buch-holm.dk) • [www.buch-holm.dk](http://www.buch-holm.dk)  
Box 10058 • S-200 43 Malmö • Tel. +46 (0)40 30 50 30 • e-mail [b-h@buch-holm.se](mailto:b-h@buch-holm.se) • [www.buch-holm.se](http://www.buch-holm.se)



Tryghed og viden

– for menneskers skyld

## Datablad

### 3M™ 1322 Comply™

## Indikator tape til dampsterilisering

### Produktbeskrivelse:

Comply™ 1322 Indikator tape til dampsterilisering består af klæbestof, rygmateriale med kemiske indikator striber. Klæbestoffet har stor vedhæftningsevne, er følsomt for tryk, og er fremstillet til at klæbe til forskellige materialer, såvel flergangs som engangs indpakkingsmaterialer. Tapen er fremstillet således, at den nemt og fuldstændigt kan fjernes fra alle typer indpakkingsmateriale, efter afsluttet sterilisering. Rygmateriale består af creppet papir, med tilstrækkelig strækstyrke som tillader udvidelse af pakken ved steriliseringsprocessen. Såfremt anbefaldede opbevaringsforhold overholdes, er indikator tapen holdbar i 18 måneder.

Den hvide indikationsstribe skifter farve, først til mørkebrun og derefter til sort, under de for dampsterilisering kritiske parametre: mættet damp, tid og temperatur.

Efter steriliseringsprocessen vil indikator farven være stabil indenfor 6 måneder, såfremt opbevaring finder sted ved <50% relativ luftfugtighed og ved max. temperatur på 30°C.

### Anvendelsesområder:

Indikator tape til dampsterilisering bruges til at indikere, at en pakke er blevet udsat for steriliseringsprocessen, og til at skelne mellem steriliserede pakker og ikke steriliserede pakker. Tapen er fremstillet til lukning af pakker der er indpakket i flergangs eller engangs indpakkingsmaterialer.

### Kontraindikationer:

Indikator tape Comply™ 1322 kan anvendes på alt indpakkingsmateriale - designed for use on all wraps.

## Brugsanvisning:

1. Fjern taperullens plastemballage, og placér rullen i en passende tapedispenser.
2. Træk en tapestrimmel ud, af cirka 20-30 cm længde.
3. Fastgør en af Indikatortapens ender på pakken, og tryk med fingerne langs tapestrimlen, således at pakken lukkes.  
TAPEN MÅ IKKE STRÆKKES LANGS MED PAKKEN, DA DETTE KAN BEVIRKE AT PAKKEN PLUDSELIG ÅBNES.
4. Gentag punkt 2 og 3 hvis indpakningsmetoden eller pakkens størrelse nødvendiggør brug af to eller flere tapestrimler.
5. Lad pakken afkøle efter endt steriliseringsproces i henhold til hospitalets rutiner.
6. Når pakken skal anvendes, åbnes pakken ved at tapen rives af ved pakkens åbningssted (foldestedet).
7. Fjern tapestrimlerne fra flergangsmaterialer, således at fastklæbring undgås, hvilken kan ske i vaskeprocessen.

Skal ikke anvendes ved sterilisering med tørvarme, ethylenoxid eller andre lavtemperatur steriliseringsprocesser.

## Opbevaring og holdbarhed:

Opbevares tørt i lukket plast emballage ved stuetemperatur. (<50% relativ luftfugtighed og ved max. temperatur 30°C)

Udløbsdato og år er trykt i koder på indersiden af hver rulle. De fire første tal viser udløbsår, de efterfølgende to tal efter stregen viser udløbsmåned og de to sidste tal viser dato. (For eks.: 1997-11-28, er 28. november 1997)

## Bestillingsinformation

### 3M™ 1222 Comply™

Varenr.:	Produktnavn	Pakning
132212	12mmx55m	42 rl/karton
132218	18mmx55m	28 rl/karton
132224	24mmx55m	20 rl/karton
132248	48mmx55m	10 rl/karton

Imødekommer krav i standard: DS/EN/ISO 11140